

SOLUCIÓN DE TELURITO DE POTASIO

REF B0360366

IVD

→ USO

Solución estéril que se agrega a los medios de cultivo Baird Parker Agar Base, Giolitti Cantoni Medio y Vogel Johnson Agar para la diferenciación de los microorganismos en base a la reducción del telurito de potasio a telurio.

CONTENIDO Y COMPOSICIÓN

Código B0360366: envase por 20 ml.
Telurito de potasio, concentración: 1%.

INSTRUCCIONES

Producto listo para usar.

Se agrega a los medios de cultivo mencionados anteriormente luego que estos han sido esterilizados en autoclave y se encuentran a temperatura entre 45-50 °C.

Importante: seguir las instrucciones de preparación de los medios de cultivo correspondientes.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Solución incolora, transparente, y con ausencia de partículas grandes.

ALMACENAMIENTO

A 2-8 °C.

CONTROL DE CALIDAD

- **Control de Esterilidad:** Satisfactorio.
- **Desempeño microbiológico en Baird Parker Agar, Giolitti Cantoni Medio y Vogel Johnson Agar:** Satisfactorio.

LIMITACIONES

No calentar el medio de cultivo luego que se agregó el telurito de potasio ya que es un producto termolábil.

MATERIALES NECESARIOS NO PROVISTOS

Equipos y material de laboratorio, microorganismos para control de calidad, reactivos y medios de cultivo adicionales según requerimiento.

PRECAUCIONES

- Solamente para uso diagnóstico in vitro. Uso profesional exclusivo.
- No utilizar el producto si al recibirlo su envase está abierto o dañado.
- No utilizar el producto si existen signos de contaminación o deterioro, así como tampoco si ha expirado su fecha de vencimiento.
- Utilizar guantes y ropa protectora cuando se manipula el producto.
- Considerar las muestras como potencialmente infecciosas y manipularlas apropiadamente siguiendo las normas de bioseguridad establecidas por el laboratorio.

- Las características del producto pueden alterarse si no se conserva apropiadamente.
- Descartar el producto que no ha sido utilizado y los desechos del mismo según reglamentaciones vigentes.

REFERENCIAS

- Corry, J.E.L., Curtis, G.D.W., Baird, R.M. 2003. Handbook of Culture Media for Food Microbiology, volume 37, Elsevier Science.

INDICACIONES AL CONSUMIDOR

Utilizar el producto hasta su fecha de vencimiento.
Conservar el producto según las indicaciones del rótulo.

AUTORIZACIÓN ANMAT

Código: B0360366
PM 1292-27
Dir. Técnico: Bioq. Alejandro Rossi

SÍMBOLOS UTILIZADOS

