

HEMOGLOBINA, SOLUCIÓN ESTÉRIL AL 2%

REF B0360784

IVD

→ USO

Este producto se agrega al GC Agar Base junto a otros componentes para la preparación de Agar Chocolate y Thayer Martin Medio Modificado.

CONTENIDO Y COMPOSICIÓN

Código B0360784: 6 frascos por 50 ml

Concentración: 2%.

pH: 8.0 ± 0.5

INSTRUCCIONES

Producto listo para usar.

Se agrega al GC Agar Base doble concentración para la preparación del Agar Chocolate y Thayer Martin Medio Modificado.

Importante: seguir las instrucciones de preparación de los medios de cultivo mencionados anteriormente.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Solución color marrón, de aspecto turbio.

ALMACENAMIENTO

A 10-35 °C.

CONTROL DE CALIDAD

- Control de Esterilidad: Satisfactorio
- Desempeño microbiológico en Agar Chocolate y Thayer Martin Medio Modificado: Satisfactorio

MATERIALES NECESARIOS NO PROVISTOS

Equipos y material de laboratorio, microorganismos para control de calidad, reactivos y medios de cultivo adicionales según requerimiento.

PRECAUCIONES

- Solamente para uso diagnóstico in vitro. Uso profesional exclusivo.
- No utilizar el producto si al recibirlo su envase está abierto o dañado.
- No utilizar el producto si existen signos de contaminación o deterioro, así como tampoco si ha expirado su fecha de vencimiento.
- Utilizar guantes y ropa protectora cuando se manipula el producto.
- Considerar las muestras como potencialmente infecciosas y manipularlas apropiadamente siguiendo las normas de bioseguridad establecidas por el laboratorio.
- Las características del producto pueden alterarse si no se conserva apropiadamente.
- Descartar el producto que no ha sido utilizado y los desechos del mismo según reglamentaciones vigentes.

REFERENCIAS

- MacFaddin. 1985. Media for isolation-cultivation-identification-maintenance of medical bacteria, vol. 1. Williams & Wilkins, Baltimore, Md.
- Isenberg (ed.). 1992. Clinical Microbiology Procedures Handbook, vol. 1. American Society for Microbiology, Washington, D.C.
- Murray P.R., Baron, Pfaller, Tenover and Tenover. 1999. Manual of clinical microbiology, 7th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C.
- Forbes, Sahm and Weissfeld. Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology, 10th ed. Mosby, Inc., St. Louis, Mo.

INDICACIONES AL CONSUMIDOR

Utilizar el producto hasta su fecha de vencimiento. Conservar el producto según las indicaciones del rótulo.

AUTORIZACIÓN ANMAT

Código: B0360784

PM-1292-27

Dir. Técnico: Bioq. Alejandro Rossi

SÍMBOLOS UTILIZADOS

IVD

DIAGNÓSTICO
IN VITRO



ELABORADOR

REF

CÓDIGO
N°



N° DE DETERMINACIONES

LOT

LOTE N°



INSTRUCCIONES DE USO

STERILE

ESTÉRIL



FECHA DE VENCIMIENTO



LÍMITE DE TEMPERATURA